


Aufbauanleitung - Schutzvisier für Augen, Nase und Mund


1. Legen Sie die Kunststoffvisierplatte auf eine saubere, staubfreie Fläche, so dass die leicht gewölbten Seitenflügel nach oben zu Ihnen zeigen. Bei der Verklebung des Schaumstoffes empfiehlt es sich Handschuhe zu tragen.

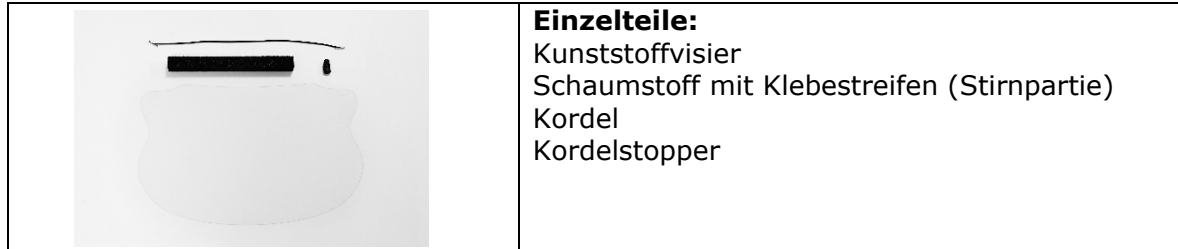

2. Nehmen Sie den Schaumstoff und entfernen Sie den Streifen vorsichtig vom Kleberand. Achten Sie insbesondere auch darauf, jeden kleinen Rest der Folie zu entfernen. Setzen Sie den Schaumstoff mittig zum oberen Rand hin an. Sie können einen kleinen Abstand von ca. 2 mm lassen. Der Schaumstoff sollte dabei am besten eine gerade Linie bilden und nicht an die Kontur der Kunststoffplatte angepasst werden! Einmal verklebt lässt sich der Schaumstoff nur schwerlich wieder entfernen. Drücken Sie mit beiden Händen für mind. 5 Sekunden fest auf den Schaumstoffpad. Dadurch verbindet sich der Kleber mit dem Kunststoff.



3. Danach nehmen Sie die Kordel und stecken diese auf einer Seite durch das vorgestanzte Loch. Dann biegen Sie das Visier und verfahren mit der anderen Seite analog. Zum Schluss fädeln Sie das Gummiband durch den Kordelstopper.

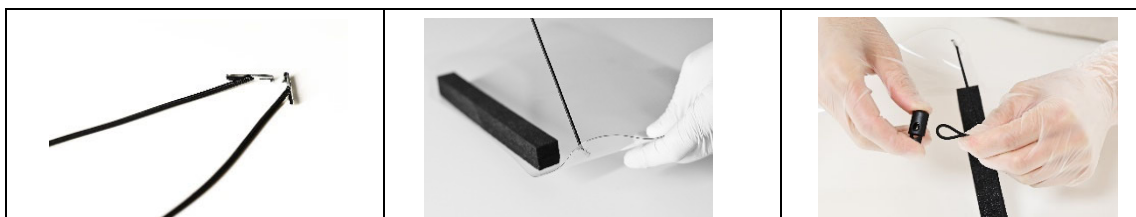

4. Fertig ist Ihr neues Schutzvisier!

